



Einstellung des Drehmoments

Zum Einstellen des Drehmoments muss die Abdeckkappe des Drehmomentgriffs entfernt werden, um an die Einstellmechanik zu gelangen und um die Sicherung der Drehmoment-einstellung aufzuheben.

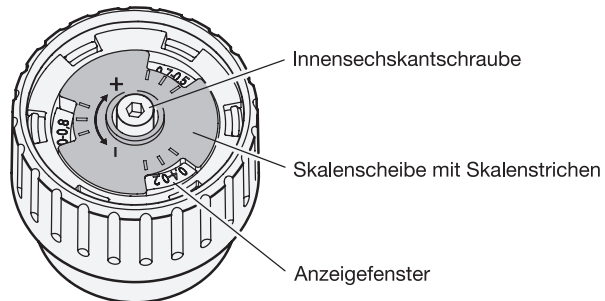

Das Drehmoment wird durch die Innensechskantschraube im Zentrum des Griffs eingestellt. Dabei bewegt sich die Skalenscheibe in axialer Richtung und erhöht bzw. verringert das zu begrenzende Drehmoment.

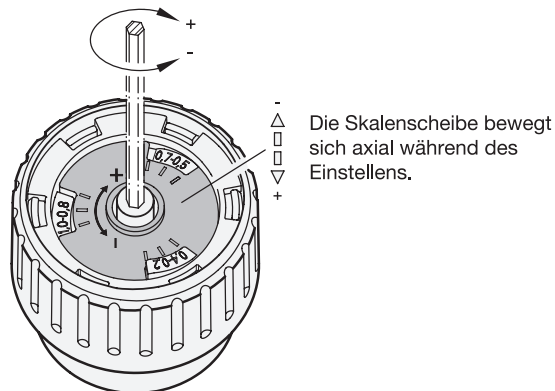

Der eingestellte Drehmomentwert wird an der Skalenscheibe angezeigt. Je nach Drehmomentwert befinden sich die schiefen Ebenen der Anzeigefenster auf einer Höhe mit den Skalenstrichen der Skalenscheibe. Nach dem Einstellen des Drehmoments muss die Abdeckkappe wieder aufgesetzt werden. Dadurch wird die Drehmomenteinstellung gesichert und die Einstellmechanik vor ungewolltem Zugriff geschützt.

Beispiel, eingestelltes Drehmoment = 0,5 Nm

